

# Mix2Vial®

- Leichte, schnelle Handhabung
- Verletzungsgefahr durch Nadelstiche bei sachgemäßer Anwendung ausgeschlossen
- Integrierter Filter
- Freie Spritzenwahl



\* Mix2Vial® ist ein Warenzeichen von West Pharmaceutical Services, Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften

# Anwendungsanleitung



1. Arbeiten Sie auf einer sauberen und festen Unterlage, am besten auf einem Tisch. Ziehen Sie zuerst nur den Verschluss der Mix2Vial®-Packung ab.



2. Jetzt stellen Sie die Wasserflasche auf den Tisch und stecken das Mix2Vial® komplett mit der Verpackung auf die Flasche. Das blaue „Wasser“-Ende rastet auf der Wasserflasche ein.



3. Entfernen Sie jetzt die Mix2Vial®-Verpackung.



4. Setzen Sie jetzt das Mix2Vial®-Set zusammen mit der Wasserflasche auf die bereitgestellte Präparateflasche. Das klare Ende muss auf der Flasche einrasten.



5. Das Wasser läuft nun in die Produktflasche. Vorsichtiges Schwenken hilft, das Pulver aufzulösen.



6. Ist das Präparat gelöst, schrauben Sie einfach die Wasserflasche ab.



7. Ihre Spritze passt in die Aufnahme des klaren Mix2Vial®-Endes – so können Sie die Lösung problemlos aufziehen. Ein separater Filter ist nicht nötig, weil im Mix2Vial®-Set ein Filter integriert ist.

**Noch ein Wort zum Schluss:**

Bitte achten Sie immer darauf, unter hygienischen Bedingungen zu arbeiten (Hände waschen, saubere Unterlage etc.).